

ACCEDA A SUS DATOS DE MCGrt

La cuenta del sistema de gestión de datos Eversense (DMS) se usa con la aplicación para móvil Eversense y la aplicación web Eversense DMS para la revisión de datos y los informes. **Si ya ha descargado la aplicación Eversense y la ha activado a través del correo electrónico, vaya al paso 3.**

► Paso 1: Crear la cuenta de Eversense

- Descargue e instale la aplicación para móvil Eversense.


Descargue la **aplicación Eversense** de Apple App Store o Google Play*.



- Después de aceptar el **acuerdo de licencia**, se le solicitará que cree y registre una cuenta con un correo electrónico y una contraseña.

- Tras completar la pantalla, toque la flecha en la parte inferior de cada página para pasar a la pantalla siguiente.

Toque **Crear cuenta**.

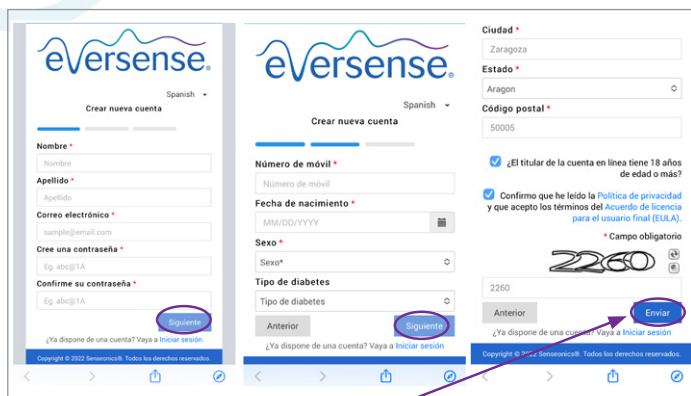

Haga clic en **Enviar**.

► Paso 2: Registre la información de inicio de sesión de la cuenta DMS

Correo electrónico:

Contraseña:

► Paso 3: Acceder a su cuenta DMS a través del ordenador

Siempre estará conectado a su cuenta a través de la aplicación Eversense, pero para obtener acceso completo a sus datos, simplemente vaya a: **https://global.eversensedms.com** e introduzca la información de inicio de sesión. Las credenciales para iniciar sesión son las mismas que usó cuando creó la cuenta de Eversense.



ACCEDA A SUS DATOS DE MCGrt


► Paso 4: Permitir que el profesional sanitario acceda a sus datos

Vincular el profesional a su cuenta de Eversense DMS

- Vaya a: <https://global.eversensedms.com> e introduzca la información de inicio de sesión.
- Seleccione **Compartir datos** en el menú de la izquierda.
- Escriba el número de clínica de Eversense DMS Pro de su clínica y pulse el botón **INTRO** del teclado.
- Seleccione su profesional[†] en la lista desplegable Profesional.
- Haga clic en “Compartir mis datos”. Se mostrará el nombre de la clínica, el nombre del profesional, el estado y los datos compartidos. El estado se mostrará como **Pendiente** hasta que la clínica acepte la invitación. Cuando la clínica acepte la invitación de **Pendiente** cambiará a **Aceptada** y la **X** cambiará a **✓** en la columna **Compartir datos**. El profesional ahora podrá ver sus datos desde la cuenta profesional de Eversense DMS Pro.



Podrá ver, enviar por correo electrónico e imprimir los informes. También puede obtener un resumen de informe automático a intervalos programables.

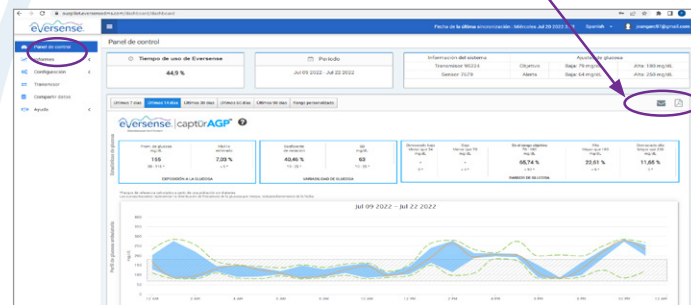

[†]La aplicación emplea las medidas de seguridad adecuadas para garantizar que los datos personales se tratan de manera segura en cumplimiento de las leyes vigentes.

► Paso 5: Comprensión de los informes de Eversense DMS

Para obtener información sobre cómo usar los datos para gestionar la diabetes, vaya a www.diabetes.ascensia.es. Haga clic en **Formación del paciente** dentro del apartado **MONITORIZACIÓN CONTINUA DE GLUCOSA**.



Para ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente, llame al:

**900 100 117 L-V 9:00 a 18:00h
(horario peninsular)**

eversense.es@ascensia.com



Distribuido por
ASCENSIA DIABETES CARE SPAIN, S.L.
WTC Almeda Park Edificio 6, 4ª Planta.
Plaça de la Pau s/n, 08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona, España
900 100 117 | www.diabetes.ascensia.es



Sistema de monitorización continua de glucosa

Fabricante: Senseonics, Inc.
20451 Seneca Meadows Parkway
Germantown, MD 20876-7005

El sistema de monitorización continua de la glucosa en tiempo real (MCGrt) Eversense® E3 está indicado para medir de forma continua los niveles de glucosa durante un máximo de 180 días en personas con diabetes mayores de 18 años. El sistema está indicado para reemplazar las mediciones capilares de glucosa en sangre (BG) para tomar decisiones sobre el tratamiento de la diabetes. Las mediciones capilares de glucosa en sangre siguen siendo necesarias para la calibración, principalmente una vez al día después del día 21, y cuando los síntomas no coinciden con la información proporcionada por el sistema de MCGrt o cuando se toman medicamentos de la clase de las tetraciclinas. Los procedimientos de inserción y extracción del sensor son realizados por un profesional sanitario certificado. El sistema de MCGrt Eversense E3 está sujeto a prescripción; los pacientes deben hablar con su profesional de la salud para obtener más información.

Para obtener información importante sobre seguridad, consulte <https://www.ascensiadibetes.com/eversense/safety-info>

Eversense, Eversense E3 Continuous Glucose Monitoring y el logotipo de Eversense son marcas comerciales de Senseonics, Incorporated. Ascensia, el logotipo de Ascensia Diabetes Care son marcas comerciales y/o marcas registradas de Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios y se utilizan únicamente con fines informativos. No debe inferirse ni implicarse ninguna relación o respaldo.

© 2022. Senseonics, Inc. Todos los derechos reservados.
© 2022. Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Todos los derechos reservados.