

CONFIGURACIÓN RÁPIDA DE DMS PRO

El software DMS Eversense® Pro está destinado para uso clínico. Esta hoja muestra cómo configurar de forma rápida una sola cuenta de DMS Pro en toda su clínica. Esta forma rápida de configuración no se recomienda si cuenta con varios usuarios en la clínica. Consulte la Guía del usuario de DMS Pro para obtener las instrucciones completas (eversensediabetes.com).

➤ Paso 1: Cree una cuenta de DMS Pro

- Vaya a <https://globalpro.eversensedms.com>.

Haga clic en **Registrarse**.

➤ Paso 2: Solicite una cuenta de DMS Eversense Pro (continuación)

- Si desea añadir profesionales concretos a su clínica de DMS Eversense Pro, consulte la Guía del usuario de DMS Eversense Pro.
- No puede utilizar la misma dirección de correo electrónico para la cuenta de DMS Eversense Pro y para una cuenta personal de DMS Eversense.

➤ Paso 2: Solicite una cuenta de DMS Eversense Pro

Introduzca la información de la clínica para cumplimentar el formulario.

- En “Nombre” y “Apellidos” se recomienda que escriba el nombre de su clínica o del profesional sanitario principal de la clínica. (Esto es lo que sus pacientes verán cuando compartan sus datos).
- Seleccione un “Título” en el menú desplegable y rellene los campos obligatorios restantes.

Haga clic en **Enviar** cuando cumplimente el formulario

➤ Paso 3: Recibirá dos correos electrónicos

- La confirmación de registro de la cuenta.
- Un correo electrónico de aprobación de la cuenta (puede tardar hasta 24 horas). Haga clic en el enlace* en el correo electrónico para completar la activación de la cuenta. A continuación, registre la información de la cuenta en el cuadro que aparece a continuación.

Nombre de la clínica:

Correo electrónico:

Contraseña:

N.º de ID de la clínica: (consulte el paso 4)

El enlace caduca a las **72 horas**, pero puede solicitar que se envíe un nuevo correo electrónico.


* Para obtener una lista completa de dispositivos compatibles, visite <https://www.ascensidiabetes.com/eversense/compatibility>



CONFIGURACIÓN RÁPIDA DE DMS PRO

➤ Paso 4: Inicie sesión en la cuenta DMS Pro de la clínica


El ID de clínica asignado está en la parte superior.

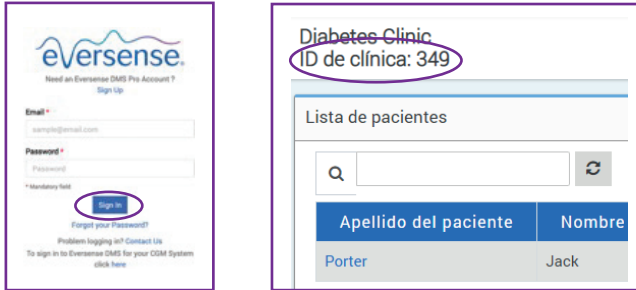

Nota: Los pacientes necesitarán el número de clínica cuando envíen una solicitud para compartir sus datos de MCG con la clínica.

➤ Paso 5: Invite a los pacientes a la clínica

- En la barra de navegación de la izquierda, haga clic en **Pacientes** y, a continuación, en **Invitar pacientes**.

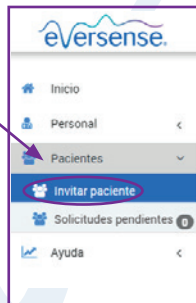


- Introduzca el correo electrónico de Eversense del paciente (el que este haya utilizado al configurar la aplicación móvil y crear la cuenta de Eversense).
- Haga clic en **Buscar en Eversense**.




➤ Paso 5: Invite a los pacientes a la clínica (continuación)

Si el correo electrónico del paciente está registrado, se mostrará el campo de debajo. Cumplimente toda la información obligatoria y haga clic en **Enviar**. Esto crea un correo electrónico de invitación para el paciente.

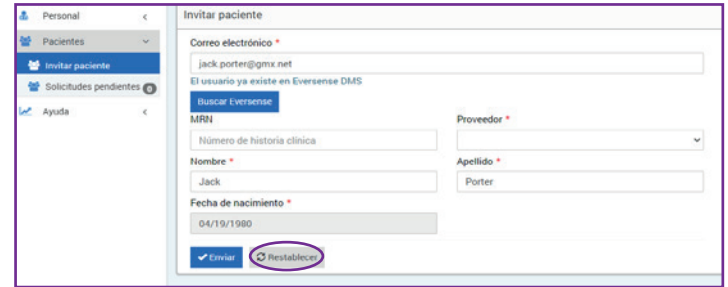

Nota: Si el correo electrónico introducido no está registrado en DMS Eversense, recibirá un mensaje de error. Confirme con el paciente cuál es la dirección de correo electrónico que utilizó al crear la cuenta.

Cuando el paciente acepte la invitación, el símbolo ✓ en "Compartir datos" cambiará a ✗. Haga clic en el apellido del paciente para ver los informes.

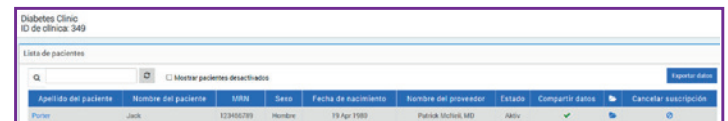

Nota: Los pacientes pueden solicitar compartir sus datos. Las solicitudes pendientes de los pacientes aparecerán en la barra de navegación de la izquierda. Haga clic en **Pacientes > Solicitudes pendientes**.

Para obtener información adicional o asistencia sobre DMS Eversense Pro, o póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Ascensia Diabetes Care en el:
900 100 117 | eversense.es@ascensia.com

El sistema de monitorización continua de la glucosa en tiempo real (MCGrt) Eversense® E3 está indicado para medir de forma continua los niveles de glucosa durante un máximo de 180 días en personas con diabetes mayores de 18 años. El sistema está indicado para reemplazar las mediciones capilares de glucosa en sangre (BG) para tomar decisiones sobre el tratamiento de la diabetes. Las mediciones capilares de glucosa en sangre siguen siendo necesarias para la calibración, principalmente una vez al día después del día 21, y cuando los síntomas no coinciden con la información proporcionada por el sistema de MCGrt o cuando se toman medicamentos de la clase de las tetraciclinas. Los procedimientos de inserción y extracción del sensor son realizados por un profesional sanitario certificado. El sistema de MCGrt Eversense E3 está sujeto a prescripción; los pacientes deben hablar con su profesional de la salud para obtener más información.

Para obtener información importante sobre seguridad, consulte <https://global.eversensedabetes.com/safety-info>

Eversense, Eversense E3 Continuous Glucose Monitoring y el logotipo de Eversense son marcas comerciales de Senseonics, Incorporated. Ascensia, el logotipo de Ascensia Diabetes Care son marcas comerciales y/o marcas registradas de Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios y se utilizan únicamente con fines informativos. No debe inferirse ni implicarse ninguna relación o respaldo.



DISTRIBUIDO POR:
ASCENSIA DIABETES CARE SPAIN, S.L.
WTC Almeda Park Edificio 6, 4ª Planta.
Plaça de la Pau s/n | 08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona, España
900 100 117 | eversense.es@ascensia.com

© 2022 Senseonics, Incorporated. Todos los derechos reservados.
© 2022 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Todos los derechos reservados.



Sistema de monitorización continua de glucosa

FABRICADO POR
SENSEONICS, INC.
20451 Seneca Meadows Parkway | Germantown
MD 20876-7005 | USA
301.515.7260 | global.eversensedabetes.com