


# Uso de los Informes de la Aplicación

El sistema de MCGrt Eversense crea automáticamente tres informes que se pueden ver en cualquier momento en la aplicación. Estos informes pueden ayudar al profesional sanitario a realizar ajustes en su plan de control de la diabetes.

➔ Para acceder a los informes de la aplicación, vaya a **Menú principal > Informes**

## El informe Resumen modal semanal:

- Proporciona un resumen de los últimos siete días de información de glucosa en un gráfico de líneas de 24 horas
- Permite ver fácilmente las tendencias de glucosa según el momento del día
- **Barras rojas** muestran las lecturas reales máxima y mínima dentro de cada bloque de una hora
- Desplácese hacia abajo para ver estadísticas de glucosa adicionales basadas en los intervalos de tiempo predefinidos

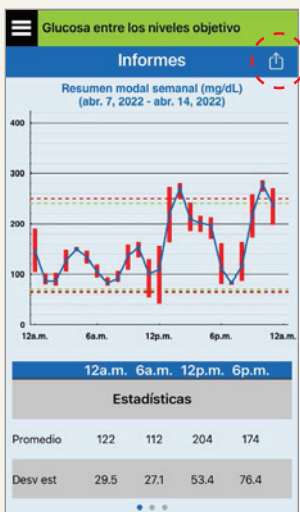


## El informe Gráfico circular de glucosa:

- Muestra el tiempo dentro del intervalo objetivo, por debajo del intervalo objetivo y por encima del intervalo objetivo
- Se pueden ver 1, 7, 14, 30, o 90 días de datos
- La comparación de datos en diferentes intervalos de tiempo puede ayudarles a usted y a su profesional sanitario a ver cómo influyen los cambios en su plan de control de la diabetes



## El informe de estadísticas de glucosa:

- Proporciona el promedio, el valor máximo y el mínimo de las lecturas según los intervalos de tiempo predefinidos
- Se pueden ver 1, 7, 14, 30, o 90 días de datos
- La comparación de datos en diferentes intervalos de tiempo puede ayudarles a usted y a su profesional sanitario a ver cómo influyen los cambios en su plan de control de la diabetes

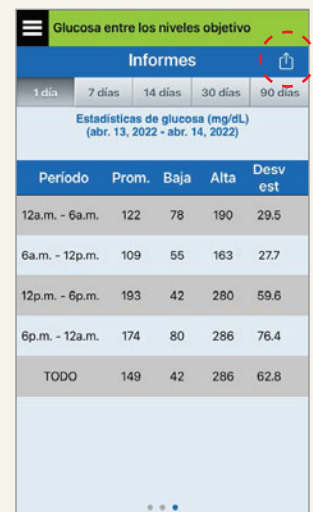

Todos los informes se pueden ver, enviar por correo electrónico o imprimir directamente desde la aplicación.