

Lista rápida de comprobación de la consulta

¿El paciente está interesado en el sistema de MCG Eversense® XL?

- Analice el sistema de MCG Eversense XL con el paciente (además de las actividades habituales de una visita normal).
 - Entréguele el folleto para pacientes
 - Comente los dispositivos disponibles
 - Comente las contraindicaciones
 - Comente los requisitos de SAGS (Sistema de análisis de glucosa en sangre)
 - Comente las ventajas principales del sistema de MCG Eversense XL
 - › Sensor de larga duración
 - › Transmisor inteligente extraíble con alertas mediante vibración sobre el cuerpo
 - › Exactitud

Se ha enviado el sistema de MCG Eversense XL a la consulta

- Cuando llegue a la consulta, guarde el paquete del sensor en el refrigerador
- Procure tener disponibles kits personalizados del procedimiento
- Acuerde con el paciente la cita para la inserción
- Repase la tarjeta de citas con el paciente
 - Pídale al paciente que se descargue la aplicación y cree la cuenta
- Cerciórese de tener los suministros necesarios para el día de la inserción
- Compruebe las fechas de caducidad de todos los suministros
- Asegúrese de tener el espacio en la consulta y un asistente disponibles para el día de la inserción
 - Kit personalizado de procedimiento
 - Guantes esterilizados
 - Lidocaína 1 % o 2 % (con o sin epinefrina)
 - Clorhexidina o solución de povidona yodada (Betadine) o 3 bastoncillos con clorhexidina y alcohol isopropílico (ChloroPrep)
- Empezar con la formación
 - Recomiende al paciente recursos educativos en diabetes.ascensia.es
 - Descargue herramientas educativas en la web de Ascensia Diabetes Care (diabetes.ascensia.es)
 - Solicite recursos educativos en el servicio gratuito de atención al cliente de Ascensia Diabetes Care 900 100 117 (9:00-18:00)

Ha llegado el día de la inserción del sistema de MCG Eversense XL

- Cerciórese de que el transmisor inteligente esté cargado
- Confirme que la aplicación esté descargada en el dispositivo móvil del paciente
- Empareje el transmisor inteligente con el dispositivo móvil
- Vincule el sensor con el transmisor inteligente/dispositivo móvil
- Entregue al paciente los adhesivos, así como la caja y los suministros del transmisor inteligente
- Supervise el proceso de formación del paciente
- Dé las instrucciones para sincronizar los datos del paciente con el centro

Sistema de MCG Eversense XL en acción

- Implemente el plan de seguimiento/próxima cita en la consulta
- Programe la cita de reinsertación en 180 días
- Recuerde volver a pedir el sensor de MCG Eversense XL 1 mes antes de la cita con el paciente
- Recomiende al paciente recursos educativos en línea en diabetes.ascensia.es



Información de los suministros para la consulta



○ Kit del sensor Eversense

- El kit se debe refrigerar inmediatamente (medidas de la caja: 17,8 × 8,1 × 2,5 cm)
- Compruebe las fechas de caducidad
- 1 kit por paciente
- Se recomienda que la consulta tenga un sensor de reserva



○ Kit de herramientas de inserción

- Incluye plantilla de incisión, herramientas de inserción y guías del usuario
- Compruebe las fechas de caducidad
- Se envía 1 kit automáticamente con cada sensor que pida
- Se recomienda que en la consulta tenga un kit de herramientas de reserva



○ Kit del transmisor inteligente

- Incluye: base de carga, adaptador de pared y guías del usuario
- Cargue el transmisor inteligente el día de la inserción
- 1 kit por paciente nuevo con un año de garantía



○ Kit del parche adhesivo

- 150 parches blancos y 30 parches transparentes (180 parches en total)
- 90 parches blancos y 10 parches transparentes (bajo solicitud)
- 90 parches transparentes y 10 parches blancos (bajo solicitud)
- Compruebe las fechas de caducidad



○ Kit personalizado de procedimiento

- Incluye elementos esterilizados y no esterilizados
- NO incluye guantes esterilizados, lidocaína, clorhexidina/povidona yodada (Betadine)


El sistema de Monitorización Continua de Glucosa (MCG) Eversense® XL está indicado para la medición continua de los niveles de glucosa hasta 180 días en mayores de 18 años con diabetes. Está destinado a complementar, no sustituir, la monitorización de la glucosa en sangre mediante análisis capilar. La inserción y extracción del sensor las realiza un profesional sanitario. El sistema de MCG Eversense XL es un dispositivo de venta con receta, los pacientes deben hablar con su profesional sanitario para obtener más información. Para obtener información importante sobre seguridad, vaya a global.eversensediatetes.com/safety-info.

Eversense, Eversense Continuous Glucose Monitoring, Eversense CGM, Eversense Sensor, Eversense Smart Transmitter, Eversense App y el logotipo de Eversense son marcas comerciales de Senseonics, Incorporated. Ascensia, el logotipo de Ascensia Diabetes Care y Contour son marcas comerciales o marcas registradas de Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Otras marcas y sus productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos titulares.

Apple Watch® es un producto de Apple, Inc. y se puede comprar por separado en un vendedor autorizado de Apple. En el sistema de MCG Eversense no se incluye el Apple Watch.

Android es una marca comercial de Google LLC.

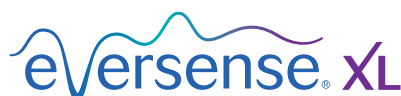

Sistema de monitorización continua de glucosa

FABRICADO POR
SENSEONICS, INC.
20451 Seneca Meadows Parkway | Germantown
MD 20876-7005 | USA
301.515.7260 | global.eversensediatetes.com



DISTRIBUIDO POR:
ASCENSIA DIABETES CARE SPAIN, S.L.
WTC Almeda Park Edificio 6, 4ª Planta.
Plaça de la Pau s/n
08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona, España
900 100 117/ diabetes.ascensia.es