

# Configuración rápida de DMS Pro

El software DMS Eversense® Pro está destinado para uso clínico. Esta página muestra la creación rápida de una cuenta de DMS Eversense Pro. Consulte la Guía del usuario de DMS Eversense Pro para obtener las instrucciones completas ([global.eversensedabetes.com](http://global.eversensedabetes.com)).

## 1 Cree una cuenta de DMS Eversense Pro

Vaya a <https://pro.eversensedms.com>.

Haga clic en **Profesional sanitario**

## 2 Solicite una cuenta de DMS Eversense Pro

Introduzca la información de la clínica para cumplimentar el formulario.

- En “Nombre” y “Apellidos” se recomienda que escriba el nombre de su clínica o de un profesional sanitario de la clínica (Esto es lo que sus pacientes verán cuando compartan sus datos).
- Seleccione un “Título” del menú desplegable y complete los campos obligatorios restantes.

Haga clic en **Enviar** cuando complete el formulario.

### Notas:

- Vea la Guía del usuario de DMS Eversense Pro para añadir más personal clínico a su clínica de DMS Eversense Pro.
- No puede utilizar la misma dirección de correo electrónico para la cuenta de DMS Eversense Pro y una cuenta personal de DMS Eversense.

## 3 Recibirá dos correos electrónicos

- La confirmación de registro de la cuenta.
- Un correo electrónico de aprobación de la cuenta (puede tardar hasta 24 horas). Haga clic en el enlace\* en el correo electrónico para completar la activación de la cuenta.
- Registre la información importante de la cuenta en el cuadro a continuación.

**\*El enlace caduca en un plazo de 72 horas. Si el enlace caduca, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Ascensia Diabetes Care.**

Nombre de la clínica: .....

Correo electrónico: .....

Contraseña: .....

N.º de ID de la clínica: .....

**NOTA:** La contraseña y el número de ID de la clínica se generan después de activar la cuenta.


## 4 Inicie sesión en la cuenta DMS Eversense Pro

El ID de clínica asignado está en la parte superior.

**Nota:** Los pacientes necesitarán el número de clínica cuando envíen una solicitud para compartir sus datos de MCG con la clínica.

## 5 Invite a los pacientes a la clínica

- En la barra de navegación a la izquierda, haga clic en **Paciente** y, a continuación, en **Invitar paciente**.
- Introduzca el correo electrónico de Eversense del paciente (el que este haya utilizado al configurar la aplicación móvil y crear la cuenta de Eversense).
- Haga clic en **Buscar en Eversense**.

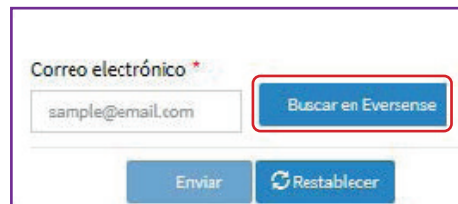

Si el correo electrónico del paciente está registrado, se mostrará el campo a la derecha. Cumplimente toda la información obligatoria y haga clic en **Enviar**. Esto crea un correo electrónico de invitación para el paciente.


**Nota:** Si el correo electrónico introducido no está registrado en Eversense, recibirá un mensaje de error. Confirme con el paciente cuál es la dirección de correo electrónico que utilizó al crear la cuenta.

Cuando el paciente acepte la invitación, el símbolo **✗** en “Compartir datos” cambiará a **✓**. Haga clic en el nombre del paciente para ver los informes.

Apellido del paciente	Nombre del paciente	Número de expediente médico	Sexo	Fecha de nacimiento	Nombre del proveedor	Estado	Compartir datos		
Kim	Jane				John Doe	Activo	✗		
Johnson	Susan		Female		John Doe	Activo	✓		
Smith	Sally	12345678	Female	mar. 23, 1989	John Doe	Activo	✗		
Smith	Joe				John Doe	Activo	✓		

Total de registros - 4

**Nota:** Los pacientes pueden solicitar compartir sus datos. Las solicitudes pendientes de los pacientes aparecerán en la barra de navegación. Haga clic en **Pacientes > Solicitudes pendientes**.

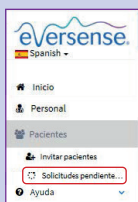

**¿Tiene preguntas?  
¡Estamos aquí para ayudarle!**  
Llame al servicio gratuito de atención al cliente de Ascensia Diabetes Care al 900 100 117 o visítenos en [diabetes.ascensia.es](http://diabetes.ascensia.es)

El sistema de Monitorización Continua de Glucosa (MCG) Eversense® XL está indicado para la medición continua de los niveles de glucosa hasta 180 días en mayores de 18 años con diabetes. Está destinado a complementar, no sustituir, la monitorización de la glucosa en sangre mediante análisis capilar. La inserción y extracción del sensor las realiza un profesional sanitario. El sistema de MCG Eversense XL es un dispositivo de venta con receta, los pacientes deben hablar con su profesional sanitario para obtener más información. Para obtener información importante sobre seguridad, vaya a [global.eversensediabets.com/safety-info](http://global.eversensediabets.com/safety-info).

Eversense, Eversense Continuous Glucose Monitoring, Eversense CGM, Eversense Sensor, Eversense Smart Transmitter, Eversense App y el logotipo de Eversense son marcas comerciales de Senseonics, Incorporated. Ascensia, el logotipo de Ascensia Diabetes Care y Contour son marcas comerciales o marcas registradas de Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Otras marcas y sus productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos titulares.

Apple Watch® es un producto de Apple, Inc. y se puede comprar por separado en un vendedor autorizado de Apple. En el sistema de MCG Eversense no se incluye el Apple Watch.

Android es una marca comercial de Google LLC.



Sistema de monitorización continua de glucosa

FABRICADO POR  
SENSEONICS, INC.  
20451 Seneca Meadows Parkway | Germantown  
MD 20876-7005 | USA  
301.515.7260 | [global.eversensediabets.com](http://global.eversensediabets.com)



DISTRIBUIDO POR:  
ASCENSIA DIABETES CARE SPAIN, S.L.  
WTC Alameda Park Edificio 6, 4ª Planta.  
Plaça de la Pau s/n  
08940 Cornellà de Llobregat  
Barcelona, España  
900 100 117/ [diabetes.ascensia.es](http://diabetes.ascensia.es)