

GlucoContro.online

Conecta con tus pacientes en
Tiempo Real




Para una gestión más eficaz de la diabetes, invita a tus pacientes a compartir sus resultados de glucosa*.

www.glucocontro.online

GlucoContro.online

Ayuda a conectar con tus pacientes

Invita a tu paciente a conectar contigo
Haz clic en “Añadir nuevo paciente”

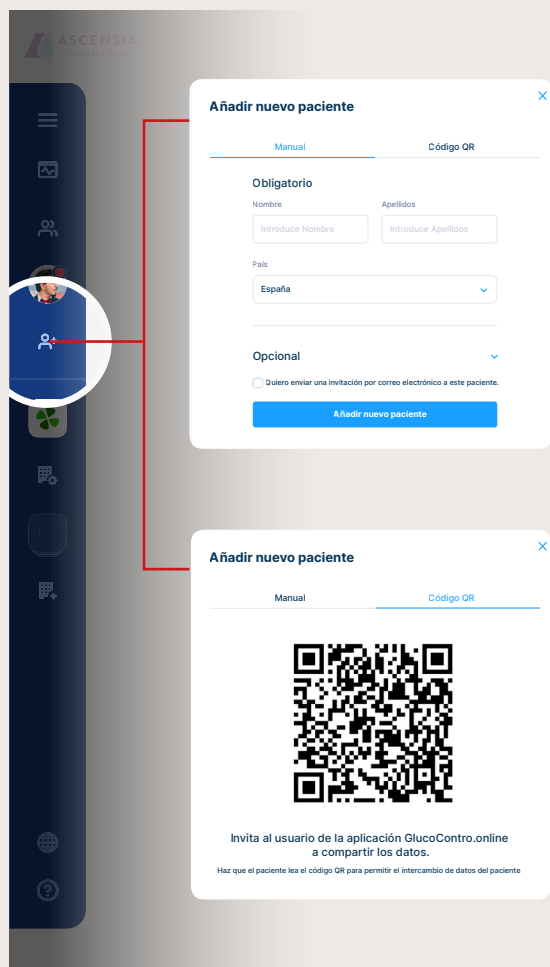

El  indica que tu paciente ha aceptado la invitación

  **Victor Sanchez** 
36 año/s Tipo 1
Médico/a: Juan Rodriguez

GlucoControl.online

Apuesta por la visualización remota de los datos

Para visualizar de forma rápida y sencilla la información de tu paciente

Menú de rápido acceso

Victor Sanchez
36 años Tipo 1
Médico/a: Juan Rodriguez

Lecturas **16**
lecturas/día **5.33**
sin lecturas **0**

⚠️ **7%**
Indicador de gestión de glucosa

⚠️ **3**
Muy Alto

📉 **1**
Muy Bajo


📉 **78mg/dL**
Desviación Estándar

156mg/dL
Promedio pre-prandial

⚠️ **245mg/dL**
Promedio post-prandial

45%
CV

Resumen: Información relevante para la toma de decisiones

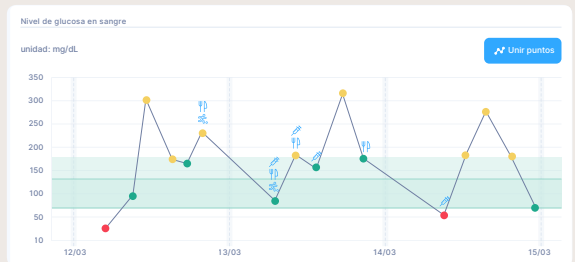

Valores de GS en sangre:
Para visualizar el porcentaje de lecturas en cada nivel de glucosa en sangre

Distribución del nivel de glucosa: Visualización de la variabilidad de las lecturas de glucosa en sangre

Tabla de lecturas

☒ Total diario insulina/carbohidratos/ejercicio

Domingo 14/03 prom **158.20** **10.0** **0.0** **0** **0**

14/03

67 8:52	188 12:11	280 14:53	183 18:33	83 22:03
-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------

mg/dL unidad

Mostrar menos Mostrar más

Tabla de lecturas: Visualización sencilla de todas las lecturas de cada día

Resumen de resultados		Total lecturas	Prom.	Muy Alto	Muy Bajo	Alto	Objetivo	Bajo	DE
	Ayuno	16	171 mg/mL	8%	3%	50%	38%	13%	78 mg/dL
	Pre-prandial	3	88 mg/mL	0%	33%	0%	33%	67%	28 mg/dL
	Post-prandial	3	156 mg/mL	0%	0%	67%	33%	0%	43 mg/dL
	Sin marca	5	245 mg/mL	60%	0%	80%	20%	0%	62 mg/dL
	Todo	5	167 mg/mL	0%	0%	40%	60%	0%	53 mg/dL

Resumen de resultados: Para un análisis más detallado de las glucemias del paciente

GlucoContro.online

Ahora más que nunca, permanece
conectado con tus pacientes



900 100 117

(L-V: 9:00 a 18:00 h)

atenciondiabetes@ascensia.com

*Para los usuarios de los medidores de las familias CONTOUR®NEXT y CONTOUR®
Material para profesionales de la salud.