


Súmate a la gestión eficaz de la diabetes

Hazte usuario de CONTOUR®DIABETES app para conectar con tu profesional sanitario

Descárgate
CONTOUR®DIABETES app

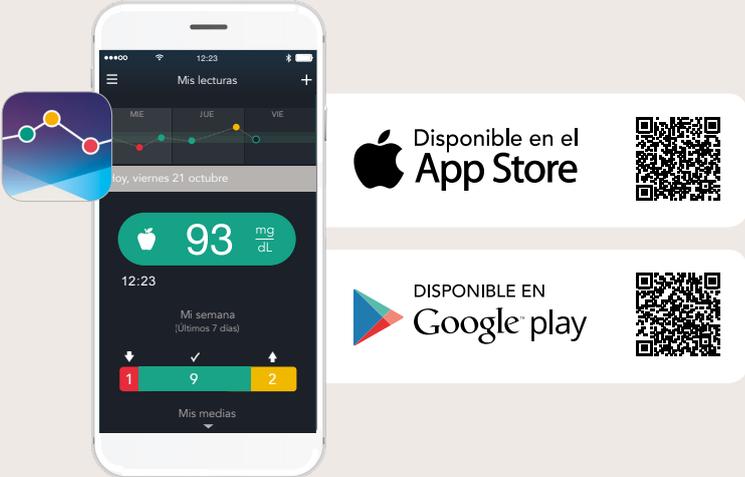

Crea una cuenta en
CONTOUR®DIABETES app



Vincula tu medidor

Para más información
accede a:

diabetes.ascensia.es

Súmate a la gestión eficaz de la diabetes

Comparte las lecturas de glucosa* con tu profesional sanitario

Para conectar con tu profesional de la salud sigue los siguientes pasos

Añadir nuevo paciente

Manual Código QR

Obligatorio

Nombre: Introduce Nombre
Apellidos: Introduce Apellidos

País: España

Opcional

Quiero enviar una invitación por correo electrónico a este paciente.

Añadir nuevo paciente

Invitación por email

1. Recibe una invitación en tu email[†] y pulsa el enlace
2. Inicia sesión con tu usuario y contraseña de CONTOUR®DIABETES app
3. Completa la información
4. Acepta la invitación

Añadir nuevo paciente

Manual Código QR



Invita al usuario de la aplicación GlucoContro.online a compartir los datos.
Haz que el paciente lea el código QR para permitir el intercambio de datos del paciente

Invitación por Código QR

1. Escanea el Código QR con tu dispositivo móvil
2. Inicia sesión con tu usuario y contraseña de CONTOUR®DIABETES app
3. Completa la información
4. Acepta la invitación

Inicia sesión en Ascensia

Personal Profesional

Contour Para acceder a tu cuenta usa las credenciales de Contour Cloud

Dirección de correo electrónico: Introduce dirección de correo electrónico

Contraseña: Introduce la contraseña ¿Olvidaste tu contraseña?

Recordarme

Iniciar sesión ¿No tienes una cuenta? Regístrate

Español



900 100 117

L-V: 8:00 a 20:00h (gratis)

atenciondiabetes@ascensia.com