

Súmate a la gestión eficaz de la diabetes

Hazte usuario de CONTOUR®DIABETES app para conectar con tu profesional sanitario

Descárgate
CONTOUR®DIABETES app



Crea una cuenta en CONTOUR®DIABETES app





Para más información accede a:

Otropico diabetes.ascensia.es






Súmate a la gestión eficaz de la diabetes

Comparte las lecturas de glucosa* con tu profesional sanitario

Para conectar con tu profesional de la salud sigue los siguientes pasos

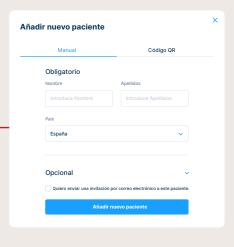


Invitación por email

- 1. Recibe una invitación en tu email† y pulsa el enlace
- 2. Inicia sesión con tu usuario y contraseña de CONTOUR®DIABETES app
- 3. Completa la información
- 4. Acepta la invitación



Invitación por Código QR

- 1. Escanea el Código QR con tu dispositvo móvil
- Inicia sesión con tu usuario y contraseña de CONTOUR®DIABETES app
- 3. Completa la información
- 4. Acepta la invitación

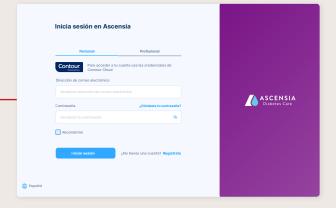



900 100 117

L-V: 8:00 a 20:00h (gratuito)

atenciondiabetes@ascensia.com

